



Invacare® | **Birdie® Family**

La liberté d'associer le confort au transfert



Avec un maximum d'espace pour l'utilisateur, la gamme de lève-personnes **Birdie** propose un système de levage et de transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise ou depuis le sol.

Ces lève-personnes sont conçus pour un pliage / dépliage en toute simplicité, sans outils. Ils peuvent être démontés en 2 parties, toujours sans outils. Avec un maximum d'espace pour l'utilisateur, la gamme de lève-personnes **Birdie** propose un système de levage et de transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise ou depuis le sol. Le **Birdie Compact** convient pour un usage à domicile : pieds raccourcis (poids maxi utilisateur 150 kg). Le **Birdie** et le **Birdie Plus** conviennent davantage pour un usage en collectivité (poids maxi utilisateur 180 kg).



**Birdie Compact**

Ecartement manuel des pieds  
Livré avec ou sans sangle  
Fléau 2 ou 4 points  
Jusqu'à 150 kg

**Birdie**

Ecartement manuel ou électrique des pieds  
Livré avec ou sans sangle  
Fléau 2 ou 4 points  
Jusqu'à 180 kg

**Birdie Plus**

Ecartement électrique des pieds  
Sangle disponible en accessoire  
Fléau 2 points  
Jusqu'à 180 kg

**Qualité et Fiabilité**

Les lève-personnes **Birdie Family** ont été conçus avec des matériaux robustes, conformément à la norme EN NF 10535 pour vous garantir un maximum de sécurité lors des transferts (certificat disponible sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)).

**Faciles à transporter !**

Les lève-personnes **Birdie Family** se plient et se démontent sans outils et sans efforts. Le système 'Snap lock' est unique avec le verrouillage automatique du mât, ainsi que sa goupille aimantée qui assure une sécurité optimale au patient et au soignant. En position pliée, ils peuvent être déplacés simplement sur les roues ou stockés verticalement ; ils sont démontables en 2 parties sans outils.

**Un confort unique**

Les lève-personnes **Birdie Family** ont été conçus avec un système de levage innovant par translation qui permet d'augmenter l'espace pour le patient. L'amplitude de la flèche (sur le **Birdie Plus**) limite les risques de contact des genoux contre le vérin. La rotation du fléau à 360° permet d'orienter le patient facilement lors des transferts et de le positionner correctement au fauteuil ou au lit. L'écartement des pieds (manuel sur **Birdie** et **Birdie Compact**, électrique sur **Birdie Plus**) facilite le transfert pour le soignant. Un choix de fléaux à démontage rapide en plusieurs tailles (jusqu'à 550 mm) en 2 ou 4 points est proposé pour définir la dimension du fléau en fonction de la morphologie du patient. Les lève-personnes **Birdie Family** permettent le ramassage au sol.

**Caractéristiques et options**



**Amplitude de la flèche**

Limite le risque de contact des genoux contre le vérin.



**Facile à plier et à stocker**

Le pliage facilite le stockage et le transport. Se plie, se démonte en toute sécurité. (Snap Lock)



**Snap lock**

Verrouillage automatique pour une sécurité optimale.



Bouton d'arrêt d'urgence protégé et descente d'urgence électrique et mécanique. Chargeur intégré.



**Birdie Plus**

- Roues de diamètre 125 mm à l'arrière pour une meilleure maniabilité
- Indicateur de charge des batteries
- Motorisation dernière génération pour une manipulation tout en douceur
- Système d'écartement des pieds électrique sous coffre, pour réduire au maximum le bruit lors de l'utilisation



**Télécommande aimantée Linak HB30**

Plus solide, plus design, plus ergonomique pour l'utilisateur, revêtement anti-dérapant.



**Poignée de guidage ergonomique et télécommande aimantée**

Facilité d'utilisation et de manipulation du lève-personnes.



**Ecartement manuel des pieds**

Ecartement facile à ajuster grâce à une large pédale.



**Levier d'écartement manuel des pieds pour Birdie ou Birdie Compact**

En option.  
Ref : 1510505-9006.



**Birdie avec piètement électrique**

Ref : 3000500.  
E1D00-0125.



**Fléau à démontage rapide 2 points**

Facile à monter et à démonter : Disponible en accessoire en longueurs 450 mm et 550 mm.



**Mousqueton de sécurité du verrouillage du fléau**

Permet d'interchanger le fléau en fonction des besoins et en conservant un maximum de sécurité.



**Roues**

Roues de diamètre 100 mm pour un meilleur roulement avec une large pédale de freinage.



**Système de pesée**

Simple à accrocher et à décrocher. Jusqu'à 200kg NF EN 45501.  
Ref : 1588942 (non étalonnable),  
Ref : 1588945 (Classe III médicale).



**Fléau à démontage rapide 4 points**

Facile à monter et à démonter : Disponible en accessoire en longueurs 450 mm et 550 mm.



## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Longueur hors-tout de la base	Largeur intérieure: pieds fermés	Poids total du produit	Hauteur min. et max.	Hauteur des pieds	Largeur intérieure: pieds ouverts	Poids max utilisateur
<i>Birdie</i>	1255 mm	660 mm	42 kg	460 - 1725 mm	115 mm	1030 mm	180 kg
<i>Birdie Compact</i>	1105 mm	540 mm	36 kg	540 - 1630 mm	115 mm	865 mm	150 kg
<i>Birdie Plus</i>	1255 mm	660 mm	47 kg	460 - 1725 mm	115 mm	930 mm	180 kg

	Nombre de cycles	Batteries	Rayon de braquage	Diamètre des roues
<i>Birdie</i>	40 cycles	2,9 Ah, charge 3-4h	1420 mm	100 mm
<i>Birdie Compact</i>	40 cycles	2,9 Ah, charge 3-4h	1090 mm	100 mm
<i>Birdie Plus</i>	40 cycles	2,9 Ah, charge 3-4h	1420 mm	100 mm



### Coloris

Gris clair /  
Gris foncé



### Normes

NF EN 10535  
NF EN 14971



**Sangle Universelle Standard** en taille M, solide livrée avec **Birdie & Birdie Compact** (écartement manuel des pieds), fléau 4 points.