

# Fauteuil STARLEV'

(Fauteuil à pousser à inclinaison électrique)



Le STARLEV' permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. Usage intérieur exclusif. **Ce fauteuil permet une aide au transfert debout par élévation de l'assise.** Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression. Le STARLEV' est un **produit exclusif** sur le marché, D.M. agréé par le CERAH.

## Caractéristiques :

- **Autonomie électrique du patient** – inclinaison 100% électrique : Assise / Dossier / Repose-jambes synchronisés.
- **Aide au transfert debout par élévation de l'assise**
- **Hygiène optimale** : modules de couette **remplaçables, amovibles et lavables** en machine à 30°.
- **Remplacement aisé** des modules de couettes en cas d'usure.
- **Composition de la couette** : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- **Coloris** : 3 types de revêtements  
**Pvc/Polyuréthane** : Cacao, Ebène et Framboise – **Velours déperlant** : Choco Edition et Black Edition - **Tissu Chiné** : Gris Chiné ou Marron Chiné.  
Revêtement Pvc/Polyuréthane correspondant aux normes **Non Feu M2**.
- **5 Largeurs d'assise** : **30 cm, 36 cm, 42 cm, 48 cm et 54 cm.**
- **Hauteur sol/siège** : **45 cm**
- **Largeur hors tout du fauteuil** : largeur d'assise + 23 cm
- **4 Options disponibles** :  
Tablette latérale - Cale tronc ajustable (droit/gauche) – Appareil de soutien partiel de la tête – Coussin Classe II – Kit Batterie
- **Poids maximum utilisateur** : 130 kilos
- Livré monté franco à l'unité
- **Fabrication française**
- Poids du fauteuil : environ 35 kg
- **Garanties** :
  - Fauteuil : 2 ans
  - Vérin : 5 ans

## **Télécommande :**

Télécommande verrouillable

Appuyer 15 secondes sur les deux boutons

(Blanc et Vert) = la télécommande est verrouillée

Appuyer à nouveau 3 secondes sur les deux boutons Blanc et Vert =

La télécommande est déverrouillée

Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.

**Bouton BLANC :** Avant

**Bouton VERT :** Arrière



**STOP & START :** Pause assise horizontale. Appuyer à nouveau sur le bouton blanc afin de bénéficier de l'aide au transfert debout.

## **Aide à l'entretien :**

La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'S.A en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôlez et nettoyez les roues. Remplacez celles-ci si nécessaire.
- Vérifiez la fixation des vis, des leviers, des boutons de réglage.
- Contrôlez les freins.
- Contrôlez le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyez-le. Remplacez le revêtement si nécessaire.

## **Caractéristiques techniques :**

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur assise	Hauteur hors-tous	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
300 mm 360 mm 420 mm 480 mm 540 mm	480 mm	Largeur d'assise + 230 mm	450 mm	1320 mm	35 kg	130 kg
Tolérances dimensionnelles et pondérales $\pm 15\text{mm} / 1.5 \text{ kg}$						